

Informaciones de pedido



Tubo Laríngeo LT
completo con mordedor y jeringa codificada

Tamaño	Paciente	Peso/Altura	Conector	REF	Caja
0	Recién nacido	hasta 5kg	transparente	32-01-000	1
1	Bebé	5-12kg	blanco	32-01-001	1
2	Niño	12-25kg	verde	32-01-002	1
3	Adulto	hasta 155cm	amarillo	32-01-003	1
4	Adulto	155-180cm	rojo	32-01-004	1
5	Adulto	más de 180cm	violeta	32-01-005	1



Tubo Laríngeo LT-D

Set de 10 Unds., completo con 10x LT-D, 1x jeringa codificada y 1x mordedor

Tamaño	Paciente	Altura	Conector	REF	Caja
3	Adulto	hasta 155cm	amarillo	32-02-003-1	1
4	Adulto	155-180cm	rojo	32-02-004-1	1
5	Adulto	más de 180cm	violeta	32-02-005-1	1

Set de 1 Und., completo con 1x LT-D, 1x jeringa codificada y 1x mordedor

Tamaño	Paciente	Altura	Conector	REF	Caja
3	Adulto	hasta 155cm	amarillo	32-02-103-1	1
4	Adulto	155-180cm	rojo	32-02-104-1	1
5	Adulto	más de 180cm	violeta	32-02-105-1	1

Set de emergencia LT-D, completo con 1x LT-D #3, #4, #5, 1x jeringa codificada y 1x mordedor

REF	Caja
32-02-209-1	1



Tubo Laríngeo LTS II
completo con mordedor y jeringa codificada

Tamaño	Paciente	Peso/Altura	Conector	REF	Caja
1	Bebé	5-12Kg	blanco	32-05-001	1
2	Niño	12-25kg	verde	32-05-002	1
2.5	Niño	125-150cm	naranja	32-05-025	1
3	Adulto	hasta 155cm	amarillo	32-05-003	1
4	Adulto	155-180cm	rojo	32-05-004	1
5	Adulto	más de 180cm	violeta	32-05-005	1



Tubo Laríngeo LTS-D

Set de 10 Unds., completo con 10x LTS-D, 1x jeringa codificada y 1x mordedor

Tamaño	Paciente	Altura	Conector	REF	Caja
3	Adulto	hasta 155cm	amarillo	32-06-003-1	1
4	Adulto	155-180cm	rojo	32-06-004-1	1
5	Adulto	más de 180cm	violeta	32-06-005-1	1

Set de 1 Und., completo con 1x LTS-D, 1x jeringa codificada y 1x mordedor

Tamaño	Paciente	Altura	Conector	REF	Caja
3	Adulto	hasta 155cm	amarillo	32-06-103-1	1
4	Adulto	155-180cm	rojo	32-06-104-1	1
5	Adulto	más de 180cm	violeta	32-06-105-1	1

Set de emergencia LTS-D, completo con 1x LTS-D #3, #4, #5, 1x jeringa codificada y 1x mordedor



REF	Caja
32-06-209-1	1

VBM Tubo Laríngeo


El Tubo Laríngeo es un dispositivo supraglótico para el uso en anestesia para la ventilación espontánea o mecánica. En emergencia, es un dispositivo eficaz para asegurar la vía aérea en caso de una vía aérea difícil o como alternativa a la mascarilla facial o la intubación.

El Tubo Laríngeo es disponible con un solo lumen (LT y LT-D) y también con doble lumen (LTS II y LTS-D). Con la versión de doble lumen, las ventajas de la Mascarilla Laríngeo (fácil colocamiento) y del Combitubo (protección contra aspiración) han sido combinadas para obtener un dispositivo para poder manejar la vía aérea.

Las diferentes versiones son disponibles en dispositivos autoclavables o de un solo uso con el fin de reducir así el riesgo de infecciones.

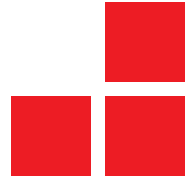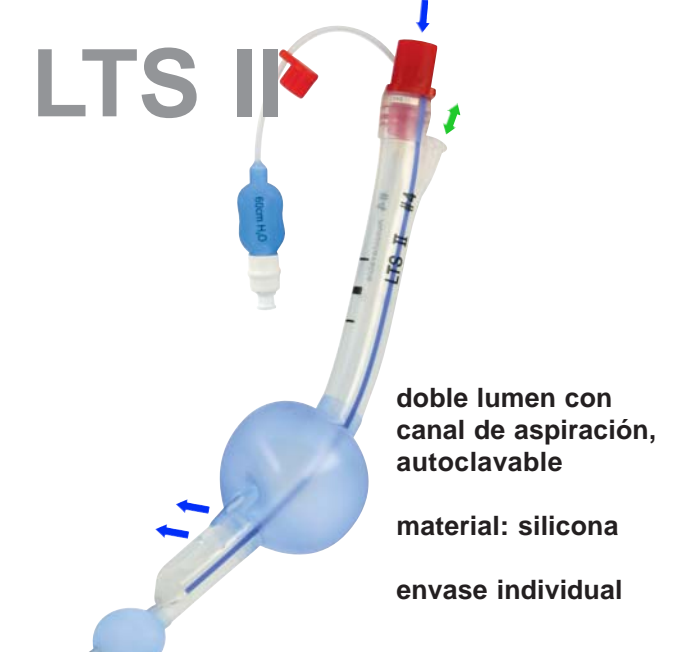

Características

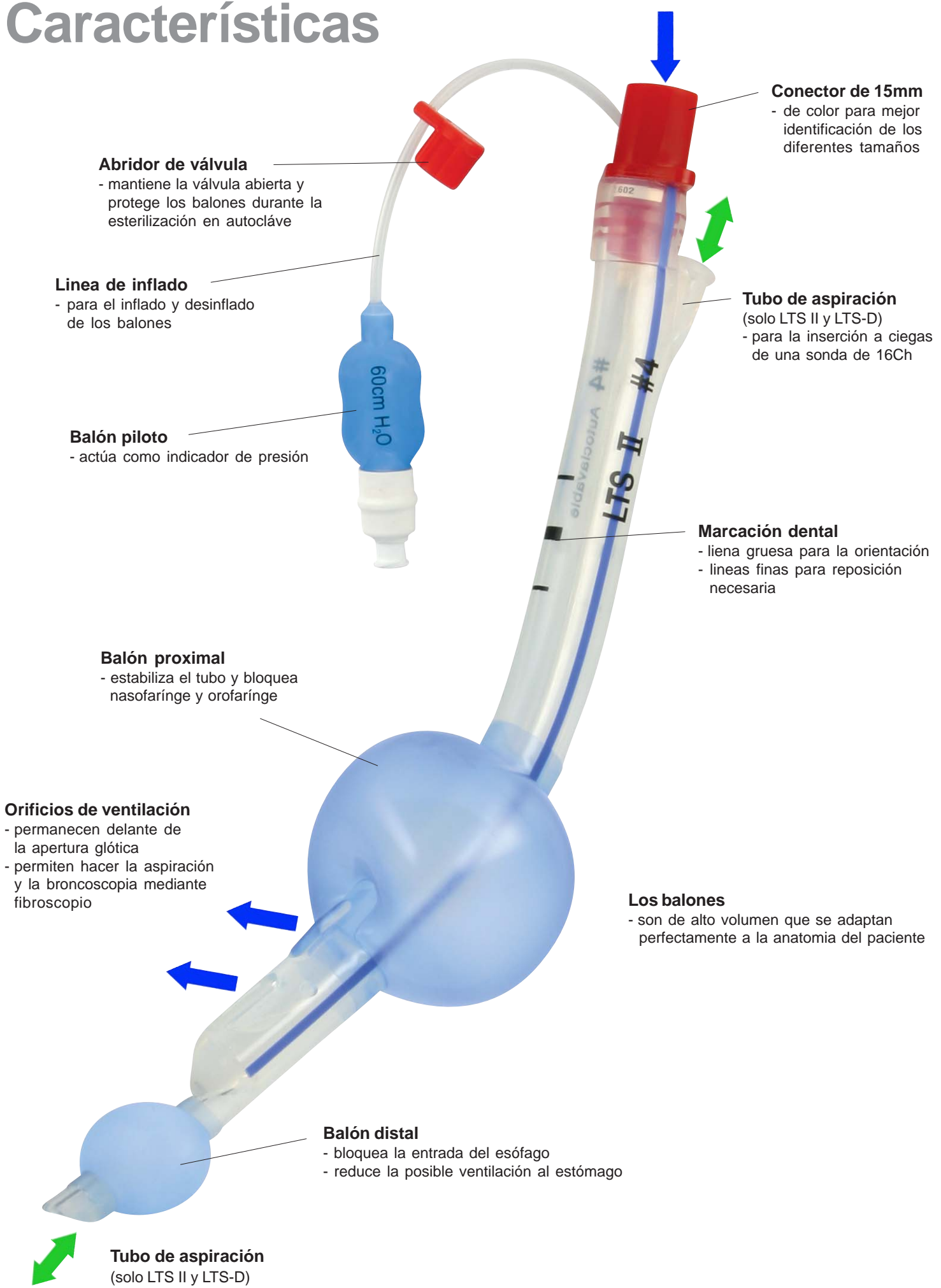

Abridor de válvula
- mantiene la válvula abierta y protege los balones durante la esterilización en autoclave

Línea de inflado
- para el inflado y desinflado de los balones

Balón piloto
- actúa como indicador de presión

Balón proximal
- estabiliza el tubo y bloquea nasofarínge y orofarínge

Orificios de ventilación
- permanecen delante de la apertura glótica
- permiten hacer la aspiración y la broncoscopia mediante fibroscopio

Balón distal
- bloquea la entrada del esófago
- reduce la posible ventilación al estómago

Tubo de aspiración
(solo LTS II y LTS-D)


Conector de 15mm
- de color para mejor identificación de los diferentes tamaños

Tubo de aspiración
(solo LTS II y LTS-D)
- para la inserción a ciegas de una sonda de 16Ch

Marcación dental
- línea gruesa para la orientación
- líneas finas para reposición necesaria

Los balones
- son de alto volumen que se adaptan perfectamente a la anatomía del paciente

Características del producto

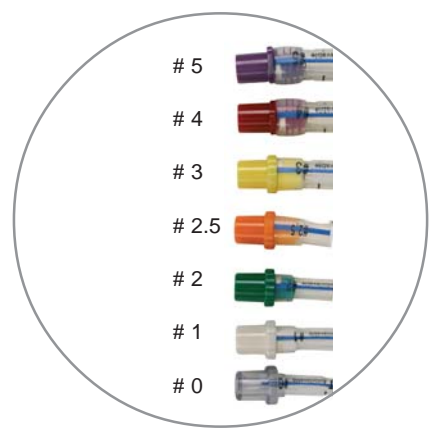


Código de color
- los conectores y la jeringa llevan un código de color

- los volúmenes aproximados de inflado están indicados en la jeringa para cada talla con el fin de inflar rápidamente los balones.

- para el uso en intervenciones electivas es recomendable una presión de 60cm de H₂O. (manómetro de control de VBM modelo « UNIVERSAL »)

Mordedor
- para fijar al tubo para proteger contra oclusión
- permite la fijación del tubo mediante cinta de fijación elástica.

Diseño
- la forma y el diseño permiten una inserción a ciegas (sin laringoscopia) y el posicionamiento del Tubo Laríngeo en la hipofarínge
- facilita la inserción del Tubo Laríngeo a personal inexperto

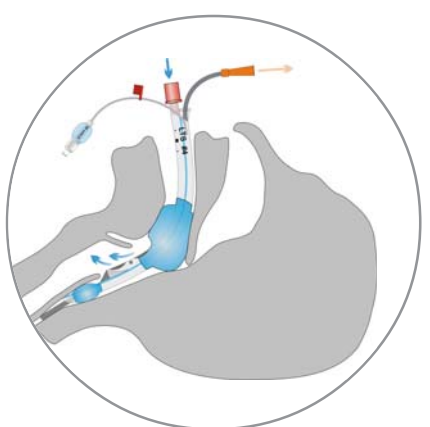

Accesorios



Manómetro de control "UNIVERSAL"
- para mantener la presión de 60cm de H₂O en intervenciones electivas
REF 54-07-000



Jeringa
con conexión Luer y código de color para los Tubos Laríngeos

Tamaño	Tubo Laríngeo	REF	Caja
20ml	# 0-1	54-04-111	50
60ml	# 2-3	54-04-444	50
100ml	# 4-5	54-04-555	50



Mordedor
Tamaño 6, para el Tubo Laríngeo # 3, 4, 5
- autoclavable **REF 40-70-060**
- de un solo uso **REF 40-60-060-1**
Tamaño 5, para el Tubo Laríngeo # 2 y 2.5
- autoclavable **REF 40-70-050**
- de un solo uso **REF 40-60-050-1**



Cinta de fijación
elástica, longitud: 75cm
REF 40-06-075 Caja 10

